

Stap 1: Start




- In deze afnameset vindt u:
 - Opvangpapier voor het opvangen van de ontlasting.
 - Potje voor het verzamelen van de ontlasting.
 - Verzendmateriaal: absorptiemateriaal, safetybag en retourenvelop.


Stap 2: Afname



- Gebruik altijd het opvangpapiertje voor opvang van de ontlasting. Dit voorkomt contact met water en vervuiling met urine en schoonmaakmiddelen uit het toilet.

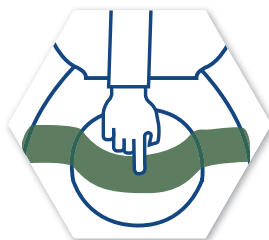

- Schuif het opvangpapier om de toiletbril. Volg hiervoor de instructies op het opvangpapier.
- Laat wat ontlasting vallen op het papiertje.

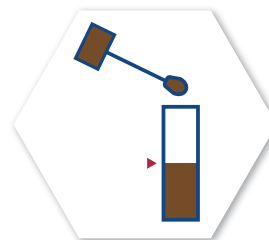

- Vul het potje tot de helft met uw ontlasting.
- Gebruik hiervoor het lepeltje dat aan de dop vastzit.
- Let op: doe het potje niet te vol.
- Draai de dop stevig vast.
- Zorg dat het potje niet vies wordt aan de buitenkant. Maak de buitenkant van het potje na het vullen schoon.

Stap 3: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en afnamedatum in op het etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op het potje.

Stap 4: Verzendklaar maken en verzenden



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis in de safetybag.
- Stop de safetybag en het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht.



- Lever de envelop in bij uw huisarts, geef hem af bij een PostNL-punt, of gooi het in een oranje brievenbus. Kijk op: postnl.nl/locatiewijzer/, kies: **Brief posten**, op zon- en feestdagen kies ook: **Medisch**.